

FICHE TECHNIQUE



Abaisse-langue spécial Nourrisson - En bois - Boîte de 200 -

L'abaisse-langue spécial nourrisson (de 1 mois à deux ans et demi) spécialement conçu p

Plus solide et plus épais, pour éviter les risques de cassure et d'ingestion accident

- En bois naturel de qualité supérieure, non toxique
- Lisse et sans aspérités pour un contact agréable et approprié à la délicatesse de la bou
- Dimensions ajustées à la morphologie des nourrissons : moins large et moins long, av
- de douceur
- Sans risque de cassure

Les + :

- Forme spéciale adaptée aux nourrissons
- Aucun goût, aucune odeur
- Contact moins froid qu'un abaisse-langue en acier ou en plastique

Dimensions :

Longueur : 113 mm

Largeur : 10 mm

Épaisseur : 2 mm

Conseils d'utilisation :

Insérer un abaisse-langue dans la bouche du patient. Exercer une légère pression sur la
Après usage, jeter l'abaisse-langue dans un conteneur réservé aux déchets médicaux.

Précautions d'emploi :

- Usage unique par nourrisson.
- Usage professionnel uniquement. Utiliser avec précaution afin de ne pas causer de bles
- Ne pas enfoncer avec excès
- Ne pas exercer de pression excessive
- Ne pas utiliser si l'abaisse-langue est endommagé

ATTENTION : les abaisse-langues enfant et adulte ne sont pas adaptés aux nourrissons.

[Découvrez notre article concernant l'importance de l'utilisation d'abaisse-langues nourris](#)

Conditionnement : en vente par boîte de 200 abaisse-langues

Matériel médical CE de classe I conforme à la MDR (Medical Device Regulation)

[Également disponible en format adulte](#)