



Applicateur de granules hémostatiques chitosan - 1-Medical

Pour arrêter le saignement de diverses blessures traumatiques superficielles ou profondes.

L'applicateur de granules hémostatiques de chitosane est utilisé pour arrêter les saignements de diverses blessures traumatiques, des accidents soudains tels que les traumatismes mécaniques, les accidents de la route, et les premiers secours pour arrêter les saignements de blessures de guerre, etc.

Il peut être utilisé pour arrêter les saignements des plaies superficielles et profondes sur la tête, le visage, les membres et le torse. Il peut être utilisé dans les établissements médicaux, sur les sites d'accidents, sur les champs de bataille de première ligne, dans les laboratoires, dans les ambulances et peut servir de solution de secours.

Spécifications techniques :

- Conditionné : 4,5 x 8,5 pouces - 115 x 220 mm,
- Poids : 6 g.

Mode d'emploi :

- Déchirez pour ouvrir l'applicateur de seringue,
- Insérez profondément dans la plaie,
- Poussez rapidement,
- Appuyez et effectuez le bandage.

Matériel médical CE.