

Assistant au massage cardiaque - Cardio First Angel V2 - Fabrication européenne

Dispositif d'aide pour une réanimation guidée efficace après un arrêt cardiaque. À la portée de tous pour sauver une vie, en attendant l'arrivée des secours.

Dispositif médical 100% mécanique, compact et portable d'aide à la réanimation lors d'un arrêt cardiaque, avant l'arrivée des secours.

Il est utilisable par tous sans compétences médicales pour prodiguer des gestes rapides de réanimation en moins de 3 minutes et sauver une vie.

Des instructions simples, précises et guidées permettent d'agir efficacement et sans appréhension en indiquant la position à adopter, la fréquence à suivre, et l'intensité de la pression à exercer lors du massage cardiaque.

Innovation de la Version 2 : Le système de ressorts est amélioré, nécessitant 20 % de force en moins par rapport à la V1 pour atteindre la même compression de 5 à 6 cm. L'exécution du massage cardiaque est ainsi simplifiée et prolongée.

- **Guide tout au long du massage pour agir vite et bien**
- Complément au défibrillateur automatique externe (DAE)
- 100% mécanique, ne nécessite aucune source d'alimentation
- Aide à adopter la bonne position, la bonne fréquence et la bonne pression
- Ne nécessite aucun contact physique direct avec la victime
- Prêt-à- l'emploi pour commencer le massage cardiaque en moins de 3 min
- Équipé d'un indicateur de profondeur de compression thoracique
- Indique si le rythme est correct grâce à un "clac/clac" sonore
- À utiliser uniquement sur des victimes de + 16 ans
- Simple d'utilisation
- Compact, portable et léger : 130 g pour une dimension 16 x 11 x 5 cm
- À usage unique
- Fabrication à Nabburg, en Allemagne

Fonctionnement :

- Prévenir les secours avant de commencer le massage cardiaque
- Sur torse nu, placer le Cardio First Angel sur le sternum, pointe vers le bas
- Bras tendus, les mains l'une sur l'autre, appuyer sur l'appareil
- Exercer une pression par à-coups jusqu'à entendre "clac"
- Relâcher la pression puis recommencer jusqu'à entendre "clac"
- Enchaîner les pressions/relâchements "clac/clac" pour atteindre 100-120 pressions/min
- Continuer jusqu'aux premiers signes vitaux ou à l'arrivée des secours

Précautions d'emploi :

- Contacter les secours avant de commencer la réanimation
- À utiliser uniquement sur des personnes de plus de 16 ans
- Dispositif à usage unique ne pouvant resservir

Garantie : 2 ans - 7 ans d'utilisation.

