

Coussin thermique chaud/froid, en gel, grand modèle 20 x 30cm - Actipoche - Cooper

L'effet chaud (au micro-ondes ou dans l'eau chaude) ou froid (au réfrigérateur ou au congélateur) pour soulager rapidement les douleurs.

Ce coussin thermique en gel permet de soulager les douleurs articulaires et musculaires rapidement et naturellement grâce à son action à chaud ou à froid (cryothérapie). Son grand format 20 x 30 cm est idéal pour apaiser les douleurs menstruelles ou pour cibler des zones telles que les lombaires. Ce coussin thermique réutilisable offre une solution durable et économique.

- Sans actif médicamenteux
- Réutilisable
- Action rapide sur la douleur
- Simple d'utilisation
- Conserve la température chaude et froide
- Housse de protection fournie

Conseils d'utilisation :

- À chaud : placer au micro-ondes (45 sec) ou dans l'eau chaude (1 min) afin de soulager les contractures musculaires et les douleurs articulaires.
- À froid : mettre au réfrigérateur (7 h) ou au congélateur (50 min maximum) dans le cas d'entorses, d'élongations ou d'hématomes.

Dimensions : 20 x 30 cm

Précautions d'emploi :

- Toujours placer le coussin dans sa housse de protection avant de l'utiliser sur la peau
- Usage externe uniquement
- Ne pas l'utiliser chez l'enfant
- Ne pas appliquer sur une peau lésée, égratignée ou irritée
- Ne pas ingérer le gel

Dispositif Médical CE

