

Coussin thermique chaud/froid en gel, moyen modèle 11x27 cm - Actipoche - Cooper

L'effet chaud (au micro-ondes ou dans l'eau chaude) ou froid (au réfrigérateur ou au congélateur) pour soulager rapidement les douleurs.

Ce coussin thermique en gel permet de soulager les douleurs articulaires et musculaires rapidement et naturellement grâce à son action à chaud ou à froid (cryothérapie). Son format de taille moyenne 11x27 cm est idéal pour apaiser les douleurs des membres inférieurs et supérieurs, tels que le coude, la cheville, l'épaule, ou encore le poignet.

Ce coussin thermique réutilisable offre une solution durable et économique.



- Sans actif médicamenteux
- Réutilisable
- Action rapide sur la douleur
- Simple d'utilisation
- Conserve la température chaude et froide
- Housse de protection fournie

Conseils d'utilisation :

- À chaud : placer au micro-ondes (1 min sec) ou dans l'eau chaude (1 min) afin de soulager les torticolis, contractures musculaires, maux de dos, lumbagos, douleurs menstruelles.

- À froid : mettre au réfrigérateur (6 h) ou au congélateur (30 min maximum) dans le cas d'entorses, d'élongations, de coups et hématomes, de maux de tête ou de dents.

Dimensions : 11 x 27 cm

Précautions d'emploi :

- Toujours placer le coussin dans sa housse de protection avant de l'utiliser sur la peau
- Usage externe uniquement
- Ne pas l'utiliser chez l'enfant
- Ne pas appliquer sur une peau lésée, égratignée ou irritée
- Ne pas ingérer le gel

Dispositif Médical CE