

FICHE TECHNIQUE







Coussin thermique chaud/froid en gel, petit modèle 10 x 15cm - Actipoche - Cooper

L'effet chaud (au micro-ondes ou dans l'eau chaude) ou froid (au réfrigérateur ou au congélateur) pour soulager rapidement les douleurs.

Ce coussin thermique en gel permet de soulager les douleurs articulaires et musculaires rapidement et naturellement grâce à son action à chaud ou à froid (cryothérapie).

Son petit format 10 x 15 cm est idéal pour le traitement des maux de tête ou de dents, des bleus ou des bosses.

Ce coussin thermique réutilisable offre une solution durable et économique.

- Sans actif médicamenteux
- Action rapide sur la douleur
- Simple d'utilisation
- Conserve la température chaude et froide
- Housse de protection fournie

Conseils d'utilisation :

- À chaud : placer au micro-ondes (20 sec) ou dans l'eau chaude (15 sec) afin de soulager les torticolis, les contractures musculaires, les maux de dos, les lumbagos ou les douleurs menstruelles.
- À froid : mettre au réfrigérateur (3 h) ou au congélateur (20 min maximum) pour soulager les coups et hématomes, les maux de tête ou de dents, les entorses et élongations

Dimensions: 10 x 15 cm

Précautions d'emploi :

- Toujours placer le coussin dans sa housse de protection avant de l'utiliser sur la peau
- Usage externe uniquement
- Ne pas l'utiliser chez l'enfant
- Ne pas appliquer sur une peau lésée, égratignée ou irritée
- Ne pas ingérer le gel

Dispositif Médical CE