



Coussin thermique microbilles à effet chaud/froid multi zones - 10 x 30cm - Actipoche - Cooper

Soulage les contractures musculaires, les étirements, les hématomes et les entorses grâce à son effet chaud (au micro-ondes ou dans l'eau chaude) ou froid (au réfrigérateur ou au congélateur).

Ce coussin thermique multi zones permet de soulager rapidement et naturellement les douleurs articulaires ou musculaires. Il agit efficacement grâce à son action à chaud ou à froid (cryothérapie), que ces douleurs soient dues à des courbatures après une activité sportive intense, à une mauvaise posture, ou à un traumatisme. Grâce aux microbilles, son ultra-flexibilité permet de mieux épouser la forme de la zone à apaiser.

Ce coussin thermique réutilisable offre une solution durable et économique.

- Sans actifs médicamenteux
- Action rapide sur la douleur
- Conserve la température chaude ou froide
- Ultra-flexible grâce à sa technologie micro-billes
- Réutilisable
- Housse de protection fournie

Conseils d'utilisation :

- À chaud, en cas de contractures musculaires ou de douleurs articulaires. Placer au micro-ondes (30 sec) ou dans l'eau chaude (45 sec).

- À froid, en cas d'entorses, d'étirements ou d'hématomes. Mettre au réfrigérateur pendant 7 heures maximum ou au congélateur durant 40 mn.

Précautions d'emploi :

- Toujours placer le coussin dans sa housse de protection avant de l'utiliser sur la peau
- Ne pas l'utiliser chez l'enfant
- Ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée
- Ne pas ingérer les microbilles
- Usage externe uniquement