

Coussin thermique microbilles pour cervicales & trapèzes - 24 x 40 cm - Actipoche - Cooper

L'effet chaud (au micro-ondes ou dans l'eau chaude) ou froid (au réfrigérateur ou au congélateur) pour soulager rapidement les contractures musculaires, les torticolis, les maux de dos et les elongations des cervicales & trapèzes.

Ce coussin thermique, conçu pour les cervicales et les trapèzes, permet de soulager rapidement et naturellement les douleurs articulaires ou musculaires. Il agit efficacement grâce à son action à chaud ou à froid (cryothérapie), que ces douleurs soient dues à des courbatures après une activité sportive intense, ou à une mauvaise posture. Grâce aux microbilles, son ultra-flexibilité permet de mieux épouser la forme de la zone cervicale et des trapèzes.

Ce coussin thermique réutilisable offre une solution durable et économique.

- Sans actifs médicamenteux
- Action rapide sur la douleur
- Conserve la température chaude ou froide
- Ultra-flexible grâce à sa technologie micro-billes
- Réutilisable
- Housse de protection fournie

Conseils d'utilisation :

- À chaud, en cas de contractures musculaires ou de douleurs articulaires. Placer au micro-ondes (30 sec) ou dans l'eau chaude (45 sec).

- À froid, en cas d'entorses, d'elongations ou d'hématomes. Mettre au réfrigérateur pendant 7 heures maximum ou au congélateur durant 40 mn.

Précautions d'emploi :

- Toujours placer le coussin dans sa housse de protection avant de l'utiliser sur la peau
- Ne pas l'utiliser chez l'enfant
- Ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée
- Ne pas ingérer les microbilles
- Usage externe uniquement

