

Destructeur d'aiguilles par fusion BD-310

Une capacité de fusion de 2 à 3 secondes pour détruire les aiguilles usagées en toute sécurité.

Le destructeur d'aiguilles BD-310 est un système de sécurité 3 en 1 permettant de brûler les aiguilles, de faire fondre le contenu de la seringue et de couper le tube d'injection.

Ce produit a été testé et validé pour les normes :

- EN 61326-1 : 2013
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013



- Appareil compact et portable
- Fusion rapide
- Fusion d'aiguilles à basse tension
- Permet de gagner de la place pour stocker les déchets d'aiguilles
- Permet d'éviter les risques de piqûres accidentelles*

ATTENTION :

- Cet appareil ne constitue pas un dispositif de stérilisation
- Ce dispositif ne se substitue pas au collecteur d'aiguilles
- Ce dispositif ne dispense pas d'utiliser le circuit des déchets médicaux pour les résidus d'aiguilles

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 196 x 230 x 140 mm

Poids : 2,36 kg

Alimentation : CA 220V \pm 10% 50Hz \pm 1H?; CA 110V \pm 10% 60Hz \pm 1H?

Puissance d'entrée : <80W

Température : + 10 ? ~ + 40 ?

Méthode de fusion : Fusionner avec basse pression, haute température

Niveau sonore : ?50 dB

Température de protection contre la surchauffe de la puce d'électrode : 85°C

Spécifications de destruction des aiguilles : 18G - 34G

Quantité de fusion par temps : ?100 seringues

Mode d'emploi :

- Insérer profondément l'aiguille usagée dans l'ouverture prévue à cet effet
- L'aiguille brûle au contact des électrodes. Des étincelles sont visibles pendant la fusion
- Couper ensuite l'embout de la seringue en tirant sur la poignée gauche
- Puis, détruire le tube de perfusion en le plaçant dans le cran de droite avant de le casser
- Les débris de l'aiguille sont tombés dans le plateau de collecte qui est prêt à être vidé.

Précautions d'emploi :

- Vider le contenu liquide de la seringue avant de la détruire
- Ne rien insérer dans le trou de fusion
- Ne pas mettre l'appareil au contact de l'eau
- Il est normal de voir de petites étincelles dans le trou de fusion

Le destructeur d'aiguilles est livré avec : ligne électrique, manuel

