



Détergent pré-désinfectant concentré pour dispositifs médicaux - Flacon 1L - Instrumed - Stéridis

Solution concentrée pour dispositifs médicaux et instruments. EN 14476.
Fabrication française.

Détergent pré-désinfectant en flacon doseur de 1L, spécialement conçu pour les dispositifs médicaux et le petit matériel utilisés en bloc opératoire, en endoscopie, ophtalmologie et contactologie.

Après immersion, il garantit l'intégrité des instruments jusqu'à 72 h, est efficace contre les biofilms de *Pseudomonas aeruginosa* et compatible avec l'utilisation en bac à ultrasons.

Matériel Médical de Classe II b.

- **Bactéricide, levuricide, tuberculocide, virucide**
- Utilisable en bac à ultrasons pour une efficacité renforcée sur les instruments complexes
- Pour une désinfection et un nettoyage en profondeur en milieu médical
- Efficace sur les dispositifs les plus sensibles
- Aspect : liquide vert
- PH neutre à 0,5% :7
- Produit biocide TP2 et TP4

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide (selon EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 14561) : 5 min à 0,5 % / 15 min à 0,5 %

Levuricide (selon EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 14562) : 5 min à 0,5 % / 15 min à 0,5 %

Tuberculocide (selon EN 14348, EN 14563) : 60 min à 2 % / 15 min à 5 %

Virucide (selon EN 14476, EN 17111) : Efficace sur le virus de l'Hépatite B, l'Herpès, le Vaccinia...*

Conditionnement : Flacon doseur de 1L

Mode d'emploi :

- Immerger le matériel médical dans un bain 5 min minimum
- Brosser ou écouvillonner, si nécessaire
- Rincer abondamment

Précautions d'emploi :

Produit réservé à un usage professionnel. Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Conserver le produit dans un environnement sec, entre 5°C et 35°C.