

### Gel Pads pour appareil Ellune - Boîte de 6 paires

6 paires de Gel Pads à utiliser sur les électrodes Ellune (anciennement LIVIA)

Les 6 paires de gel pads pour appareil Ellune permettent d'utiliser le dispositif pour 6 mois. Ces autocollants gel pads ne s'utilisent que sur les électrodes du dispositif médical Ellune.

Il est conseillé de changer ces 2 gel pads à chaque cycle menstruel.

Ce paquet contient :

- 6 paires de Gel Pads Ellune (soit 12 gels pads)

Pour remplacer les Gel Pads :

- 1/ Enlever les gel pads usés des électrodes Ellune
- 2/ Ouvrir l'emballage d'une paire de Gel Pads
- 3/ Retirer la protection du côté de l'opercule 1
- 4/ Alignez le Gel Pads sur l'électrode et retirer l'opercule 2

Les électrodes collent à votre peau grâce aux gel pads. Il est conseillé de remplacer ces pads à chaque cycle menstruel, pour s'assurer qu'ils collent toujours bien et éviter ainsi une possible irritation de la peau.

Recommandé par les gynécologues.

Dimensions : 6cm x 6cm

**Important** - contre indication :

Ellune ne peut pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque ou souffrant de tout autre trouble cardiaque ou un autre dispositif électronique implanté.

Ellune ne peut pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que par des enfants de moins de 15 ans.

Matériel Médical CE - Classe 2a

