



### Mouche-bébé sécurisé - Soft & Clean - REER

Mouche-bébé pour un nettoyage délicat et sécurisé des sécrétions nasales des bébés - Sans latex, phtalate ou PVC

Le mouche-bébé Soft & Clean est un aspirateur nasal conçu pour retirer en douceur et sans douleur les sécrétions nasales des bébés afin de faciliter la respiration.

Doté d'un embout d'aspiration mou de forme ronde, le mouche-bébé Soft & Clean n'irrite pas les muqueuses nasales, y compris les plus sensibles.

#### Caractéristiques techniques :

- Petite pointe douce, flexible, arrondie
- En silicone souple pour s'adapter aux petites narines des bébés
- Il ne contient aucune pièce susceptible d'être avalée ou inhalée
- Corps en caoutchouc de l'aspirateur antidérapant, pour plus de sécurité
- Sans Phtalate, Latex ou PVC
- Matériau de l'embout nasal et de la poire d'insufflation : 100% TPE
- Testé dermatologiquement

**Coloris :** Bleu

#### Conseils d'utilisation :

- Appuyer au centre de la poire d'insufflation et mettre avec précaution l'embout d'aspiration dans une narine.
- Boucher délicatement l'autre narine avec le doigt.
- Réduire ensuite la pression sur la poire d'insufflation afin d'aspirer les sécrétions.

#### Nettoyage et rangement :

- Le mouche-bébé Soft & Clean est démontable
- Nettoyer le mouche-bébé avant la première utilisation à l'aide d'un nettoyant doux et à l'eau chaude.
- Veiller à ne pas utiliser de produits chimiques susceptibles d'endommager le matériel.
- Le mouche-bébé peut être désinfecté au stérilisateur ou en le faisant bouillir 5 min.
- Pour ranger le mouche-bébé de façon hygiénique, introduire l'embout d'aspiration dans le corps de l'aspirateur.

*Matériel médical CE.*