

FICHE TECHNIQUE



Mousse Détergente Désinfectante - Spray DHP - Flacon spray mousse 750 ml - Steridis

Pour surfaces dures et dispositifs médicaux invasifs et non invasifs. Action sur virus enveloppés en 5 min EN 14476. Usage professionnel et grand public. Fabrication française.

Ce produit n'est pas concerné par la certification

Pour en savoir plus : [CERTIBIOCIDES : Robé Médical vous informe !](#)

Le Spray DHP est une mousse détergente et désinfectante conçue pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non poreuses ainsi que les dispositifs médicaux, qu'ils soient invasifs ou non invasifs.

Il est adapté à un usage dans les milieux médicaux et alimentaires : nettoyage et désinfection des surfaces dures non poreuses, désinfection des dispositifs médicaux non immergeables (générateurs d'hémodialyse, sondes d'échographies, unités dentaires...), ou utilisation sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires.

Matériel Médical de Classe IIb.

- **Bactéricide, virucide, levuricide, fongicide, sporicide**

- Solution prête à l'emploi
- Aucune dilution nécessaire
- Sans rinçage
- Sans alcool
- Sans parfum
- Produit biocide TP2 et TP4
- Fabriqué en France

Propriétés microbiologiques à 20°C :

- **Bactéricide** : 2 à 5 minutes (Normes : EN 1276, EN 13727, EN 13697)
- **Levuricide** : 5 minutes (Normes : EN 1650, EN 13624, EN 13697)
- **Fongicide** : 15 minutes (Normes : EN 1650, EN 13624, EN 13697)
- **Sporicide** : 15 minutes (Norme : EN 13704, actif sur *Clostridium difficile*)
- **Virucide** : 5 minutes (Norme : EN 14476, actif sur Vaccina, Rotavirus, PRV - modèle pour Hépatite B, BVDV - modèle pour Hépatite C, contre les virus enveloppés)

Conditionnement : Flacon spray mousse de 750 ml.

Mode d'emploi :

- Pulvériser sur la surface ou le dispositif médical à nettoyer et désinfecter, en s'assurant de mouiller entièrement la surface.
- Utiliser un tissu propre pour bien répartir le produit.
- Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

Précautions d'emploi :

- Produit destiné à un usage professionnel uniquement. Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation. Utiliser les biocides avec précaution.

Formulation : Poly(oxy-1,2-ethanediyl),
a-[2-(didécylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel) : 0,21 %
(CAS : 94667-33-1), Agents de surface non ioniques, Agents séquestrants,

