

### Nébuliseur à compresseur A120 - 17L/ min - Emed - Fabrication européenne

Nébuliseur compact et mobile pour l'aérosolthérapie. Convient aux adultes et aux enfants.

Le nébuliseur A120 est un dispositif médical d'aérosolthérapie pour les pathologies respiratoires.

Son compresseur à pistons haut débit assure une nébulisation puissante et uniforme, optimisant ainsi l'efficacité du traitement.

#### Il transforme les médicaments en particules très fines à inhaler

- Idéal pour les personnes atteintes d'asthme, de laryngite, pharyngite, rhinite, sinusite, bronchite, trachéites...
- Équipé d'un compartiment pour ranger les accessoires
- Poignée de transport
- Convient à toute la famille, adultes, personnes âgées et enfants
- Silencieux
- Nettoyage simple et rapide

#### Caractéristiques de l'appareil :

- Fabrication européenne
- Dimensions : 210 x 270 x 135 mm
- Poids : 1.3 kg
- Réservoir de médicament : 2 à 10 ml
- Résidu liquide : 0.3 ml
- Pression maximale : 2.3 bar
- Débit variable d'aérosol : 13 à 17 litres / min
- Taille des particules propulsées : < 3 µm
- Usage intermittent : 20 min ON - 40 min OFF
- Pression d'utilisation : 0.5 / 0.7 bar
- Pression atmosphérique : 700 hPa min - 1060 hPa max
- Adaptateur secteur, puissance : 230 V - 50 Hz - 120 VA
- Intensité sonore : 59 dB

#### Le nébuliseur est livré avec :

Un masque adulte, un masque enfant, un embout nasal, un embout buccal, un tube de connexion, des filtres de rechange et un manuel d'instructions.

#### Conseils d'utilisation :

- Poser l'appareil sur une surface plate.
- Verser les médicaments dans le nébuliseur.
- Allumer l'appareil.
- Se mettre en position assise et garder la tête droite.
- Placer le masque sur la bouche
- Respirer par la bouche tout au long de la séance

#### Précautions d'emploi :

- Nettoyer le nébuliseur à l'eau chaude et savonneuse après chaque utilisation
- Demander à votre pharmacien ou à votre fournisseur de matériel médical comment procéder à la maintenance en le laissant tremper dans l'eau bouillante pendant 20 minutes.

