

Nébuliseur à compresseur A1600 - 17L/ min - Emed - Fabrication européenne

Dispositif médical compact et mobile pour l'aérosolthérapie. Convient aux adultes et aux enfants.

Dispositif d'aérosolthérapie, à la pointe de la technologie, conçu pour les personnes atteintes de pathologies respiratoires : asthme, laryngite, pharyngite, rhinite, sinusite, bronchite, trachéites...

Son compresseur à pistons haut débit offre une **nébulisation puissante** et convertit les médicaments liquides en fine brume pour une inhalation uniforme et efficace.

- **Dispositif médical classe IIa, garanti 2 ans**
- Transforme les médicaments en particules très fines à inhaler
- Convient à toute la famille, adultes, personnes âgées et enfants
- Très léger, à la forme épurée, et facilement transportable
- Silencieux
- Nettoyage simple et rapide

Caractéristiques de l'appareil :

- Fabrication européenne
- Dimensions : 150 x 150 x 95 mm
- Poids : 1.25 kg
- Réservoir de médicament : 2 à 10 ml
- Résidu liquide maximal : < 0.5 ml
- Pression maximale : 3.5 bar
- Débit variable d'aérosol : 13 à 17 litres / min
- Intensité sonore : 59 dB
- Usage intermittent : 20 min ON - 40 min OFF
- Taille des particules propulsées : < 5 µm
- Pression d'utilisation : 0.5 / 0.7 bar
- Pression atmosphérique : 700 hPa min - 1060 hPa max
- Adaptateur secteur : 230 V - 50 Hz

Le nébuliseur est livré avec :

Un masque adulte, un masque enfant, un embout nasal, un embout buccal, un tube de connexion, des filtres de rechange et un manuel d'instructions.

Conseils d'utilisation :

- Poser l'appareil sur une surface plate.
- Verser les médicaments dans le nébuliseur.
- Allumer l'appareil.
- Se mettre en position assise et garder la tête droite.
- Placer le masque sur la bouche
- Respirer par la bouche tout au long de la séance

Précautions d'emploi :

- Nettoyer le nébuliseur à l'eau chaude et savonneuse après chaque utilisation
- Demander à votre pharmacien de vous fournir un sachet de nettoyage à l'eau bouillante pendant 20 minutes.

