



### Nébuliseur électropneumatique avec compresseur A430 -17 litres / min - Emed - Fabrication européenne

Nébuliseur compact et mobile pour l'aérosolthérapie. Convient aux adultes et aux enfants.

Le nébuliseur A430 est un dispositif médical d'aérosolthérapie destiné aux personnes atteintes de pathologies respiratoires. Il utilise une technologie de pointe pour convertir les médicaments liquides sous forme de fine brume afin de faciliter leur inhalation. Son compresseur à pistons haut débit produit une nébulisation puissante qui permet d'administrer, de façon uniforme, davantage de médicaments pour un traitement plus efficace.

- Idéal pour les personnes atteintes d'asthme, de laryngite, pharyngite, rhinite, sinusite, bronchite, trachéites...
- Transforme les médicaments en particules très fines à inhaler
- Convient à toute la famille, adultes, personnes âgées et enfants
- Très léger, à la forme épurée, et facilement transportable
- Silencieux
- Nettoyage simple et rapide

#### Caractéristiques de l'appareil :

- Fabrication européenne
- Dimensions : 170 x 165 x 100 mm
- Poids : 1.2 kg
- Réservoir de médicament : 2 à 10 ml
- Résidu liquide maximal : < 0.5 ml
- Pression maximale : 3.5 bar
- Débit variable d'aérosol : 13 à 17 litres
- Intensité sonore : 59 dB
- Usage intermittent : 20 min ON - 40 min OFF
- Taille des particules propulsées : 3µm
- Pression d'utilisation : 0.5 / 0.7 bar
- Pression atmosphérique : 700 hPa min - 1060 hPa max
- Adaptateur secteur, puissance : 230 V - 50 Hz - 120 VA

#### Le nébuliseur est livré avec :

Un masque adulte, un masque enfant, un embout nasal, un embout buccal, un tube de connexion, des filtres de rechange et un manuel d'instructions.

#### Conseils d'utilisation :

- Poser l'appareil sur une surface plate.
- Verser les médicaments dans le nébuliseur.
- Allumer l'appareil.
- Se mettre en position assise et garder la tête droite.
- Placer le masque sur la bouche
- Respirer par la bouche tout au long de la séance

#### Précautions d'emploi :

- Nettoyer le nébuliseur à l'eau chaude et savonneuse après chaque utilisation
- Rincer à l'eau claire et le laisser sécher à l'air libre
- Procéder à sa stérilisation une fois par semaine en le laissant tremper dans l'eau bouillante pendant 20 minutes.