

### Protège sonde abdominale ou lombaire en latex - Diamètre large - Boîte de 144 unités

### Protège-sonde abdominale ou lombaire en latex naturel, à usage unique, sans réservoir.

Pour sonde échographique de diamètre large (supérieur à 32 mm) : abdominale ou lombaire.

Utilisable pour la rééducation périnéale.

- Résistant
- Non stérile
- 100 % latex de caoutchouc naturel
- Non lubrifié, permettant l'ajout de gel compatible
- Matériau souple et texture lisse
- À usage unique

#### Dimensions :

Longueur : +/- 192 mm.  
Largeur déroulée : +/- 52 mm.

**Conditionnement** : Vendu par boîte de 144 unités, sous emballage individuel.

#### Mode d'emploi :

- Enfiler le protège sonde sur la sonde en le déroulant jusqu'au bout
- Après intervention, ré-enrouler le protège sonde sur lui-même

#### Précautions d'emploi :

- Ne pas réutiliser. Ce dispositif est à usage unique.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou si la stérilité semble compromise.
- S'assurer que le protège-sonde est bien adapté à la sonde utilisée pour éviter toute déchirure.
- Éviter de stocker le produit dans des environnements humides ou à des températures extrêmes.

*Matériel médical CE.*

