

## FICHE TECHNIQUE

### Protège sonde vaginale ou rectale en latex - Petit diamètre - Boîte de 144 unités

### Protège-sonde vaginale ou rectale en latex naturel, à usage unique, sans réservoir.

Pour sonde échographique de petit diamètre (à partir de 24 mm) : vaginale, rectale, doppler fœtal.

- Résistant
- Non stérile
- 100 % latex de caoutchouc naturel
- Non lubrifié, permettant l'ajout de gel échographique compatible
- Matériau souple et texture lisse pour une insertion facile et confortable
- À usage unique

#### Dimensions :

- Longueur : +/- 192 mm.
- Largeur déroulée : +/- 37 mm.

**Conditionnement** : Vendu par boîte de 144 unités, sous emballage individuel.

#### Mode d'emploi :

- Enfiler le protège sonde sur la sonde en le déroulant jusqu'au bout
- Après intervention, ré-enrouler le protège sonde sur lui-même

#### Précautions d'emploi :

- Ne pas réutiliser. Ce dispositif est à usage unique.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou si la stérilité semble compromise.
- S'assurer que le protège-sonde est bien adapté à la sonde utilisée pour éviter toute déchirure.
- Éviter de stocker le produit dans des environnements humides ou à des températures extrêmes.

*Matériel médical CE.*

