

FICHE TECHNIQUE









Set brosse pour le dos Sansuwell - pour la douche et le bain - avec 5 accessoires

Permet d'atteindre facilement toutes les zones du corps.

Le set de soins corporels permet d'atteindre facilement toutes les zones du corps.

Le manche extra-long d'environ 59 cm est réglable en 3 angles différents (90°/140°/180°) : il permet d'atteindre les endroits difficiles comme le dos.

- Set de soin corporel avec 5 accessoires
- Avec manche extra-long
- 3 angles différents : 90°/140°/180°
- Permet d'atteindre des endroits difficiles du corps
- Les accessoires peuvent être utilisés sans manche

Ce set comprend 5 accessoires : éponge, brosse, brosse luffa, pierre ponce, aide à l'application de crème.

Les accessoires peuvent être facilement interchangés. Ils peuvent également être utilisés séparément, sans manche.

Éponge

L'éponge peut être utilisée pour nettoyer le corps, en particulier les zones difficiles d'accès (par exemple, le dos). Humidifiez simplement l'éponge avec de l'eau et du gel douche pour nettoyer votre corps.

Brosse

La brosse se distingue par les poils doux. Nettoyage du corps comme avec l'éponge, en plus vous pourrez recevoir un effet de massage léger et apaisant. La brosse peut être utilisée humide et sèche.

Éponge Luffa (éponge recouverte de luffa)

Le luffa est un produit naturel qui peut être utilisé pour un gommage doux et pour stimuler la circulation. L'éponge peut s'utiliser humide ou sèche et élimine les squames et le moindre poil. Pour cela, massez tout le corps avec des mouvements circulaires. La tête de la brosse ne doit être utilisée que sur une peau saine et non blessée. Après utilisation, rincez à l'eau chaude et laissez sécher complètement à l'air pour éviter la croissance de bactéries. La brosse peut être désinfectée régulièrement. Conservez dans un endroit sec. Un changement régulier de cet accessoire est recommandé.

Pierre ponce

La pierre ponce s'utilise sur peau humide, notamment sous les pieds pour éliminer la corne. Trempez vos pieds dans l'eau chaude, rincez la pierre ponce et frottez la peau en douceur. Rincer les parties de peau retirées avec de l'eau. La pierre ponce doit être nettoyée après chaque utilisation, par exemple avec de l'eau et du savon. Brossez la pierre pour enlever les petites parties de peau, rincez-la et séchez-la soigneusement. Conservez dans un endroit sec. Un changement régulier de cet accessoire est recommandé.

Applicateur de lotions

Les crèmes, lotions et autres produits de soin peuvent être appliqués sur le corps avec l'applicateur de lotion. Appliquez le produit de soin à l'aide de l'applicateur et étalez-le délicatement sur votre peau.

Coloris: Blanc-gris

Mode d'emploi:

Les accessoires du Set de Soin peuvent être utilisés séparément à la main ou avec la poignée. Pour la fixation sur la poignée, faire glisser le bouton vers le bas et mettre en place l'accessoire choisi (goupille de verrouillage vers le haut). En relâchant le bouton, la tête de brosse est fixée.

Pour retirer, procéder dans l'ordre inverse

Pour régler l'angle du manche (90°/140°/180°), faire glisser le bouton du col vers le bas et déplacer la partie supérieure du manche vers le haut ou vers le bas.

Relâcher le bouton et continuer jusqu'à ce que l'angle demandé soit atteint.

Pour plier le manche, faire glisser le bouton du col vers le bas et le plier complètement. Pour déplier, procéder dans l'ordre inverse.

Nettoyage / désinfection :

o Rincer tous les accessoires à l'eau chaude, en utilisant des détergents doux ou du savon (nettoyage spécial des produits naturels, voir au-dessus !). o Après un rinçage complet, les accessoires doivent être séchés à l'air libre et stockés dans un endroit sec pour éviter la croissance de bactéries.

Le Body Care Set peut être désinfecté avec un désinfectant commercial sans chlore.

<u>Important</u>: Lors de l'utilisation de désinfectants, les instructions d'utilisation du fabricant doivent être respectées.