

### **Stérilisateur vapeur pour biberons, spécial micro-ondes - Vapostar**

Pour la désinfection quotidienne des biberons au micro-ondes - 100% polypropylène - Convient à tous les types de biberons.

Le stérilisateur Vapostar se met au micro-ondes afin de stériliser et d'éliminer les bactéries des biberons grâce à la vapeur d'eau, sans produits chimiques. Le processus est minutieux, hygiénique et dure environ 7 minutes.

Tous les biberons peuvent être désinfectés dans le stérilisateur vapeur, y compris les biberons à poignée, à goulot large, ou les biberons en verre, à condition qu'ils ne touchent pas le couvercle.

#### **Caractéristiques techniques :**

- Dimensions : diamètre de 26,5 cm x hauteur de 16 cm
- 100% polypropylène
- Temps de désinfection : environ 7 minutes
- Peut contenir jusqu'à 4 biberons et accessoires
- Avec le couvercle fermé, le contenu reste désinfecté au moins 3 heures
- Convient à tous les types de micro-ondes

#### **Contenu du stérilisateur :**

- Un porte-biberons avec poignée
- Une cuvette
- Un couvercle

#### **Utilisation :**

- Avant utilisation, laver soigneusement les biberons avec un liquide vaisselle
- Démonter le biberon et le placer avec ses accessoires dans la cuvette
- Verser environ 200 ml d'eau dans la cuvette (ne pas utiliser de solutions chimiques ou de tablettes)
- Placer le porte-biberons dans sa cuvette et visser la poignée
- Remettre le couvercle sur la cuvette et le placer au four micro-ondes
- Voir les températures et durées sur le mode d'emploi
- Une fois fini, laisser le stérilisateur refroidir au moins 2 minutes
- Il est possible de laver le stérilisateur au lave-vaisselle

#### **Précautions d'emploi :**

- Ne jamais porter l'unité par la poignée du couvercle
- Lorsque le couvercle est retiré, de la vapeur chaude peut encore s'évaporer

*Matériel médical CE.*

**Conforme aux directives européennes :** 2001/95/EU, 1907/2006/EU, (EU) 850/2004, 1935/2004/EU, (EU) 10/2011.

