

Test COMBO Antigène NS1 et Anticorps IgG/IgM de la Dengue - Boîte de 20 tests - TROD'DENGUE- AAZ

Détecte les 4 sérotypes du virus de la Dengue dans le sang total, le sérum ou le plasma. Résultats en 10 mn. Validé par le CNR Arbovirus. Laboratoire AAZ - Fabrication française.

TROD'DENGUE est un test rapide d'orientation diagnostique conçu pour le dépistage.

La présence de l'antigène NS1 indique une infection active, tandis que les anticorps IgM et IgG déterminent l'état immunitaire du patient et indiquent si l'infection est récente, antérieure ou avant vaccination.

- Destiné à un usage professionnel de diagnostic in vitro

- Test d'immunodosage à usage unique
- Détection des 4 sérotypes du virus de la Dengue
- Dans le sang total, le sérum ou le plasma
- Diagnostic fiable et rapide en 10 minutes
- Pour une prise en charge ciblée et rapide du patient
- TROD'DENGUE est validé par le CNR Arbovirus
- Utilisation simple
- Outil précieux et allié du dépistage en officine

Conditionnement : Vendu par boîte de 20 tests.

Contenu de la boîte :

- 20 cassettes de tests avec absorbeur d'humidité dans des sachets scellés
- 1 sachet de 20 pipettes de 10 µl
- 1 sachet de 20 pipettes de 30 µl
- 1 flacon de tampon de 4.0 ml
- 20 lancettes
- 20 tampons d'alcool
- 1 notice d'utilisation

Mode d'emploi :

1. Retirer le capuchon de la lancette
2. Piquer le doigt du patient et laisser se former une grosse goutte de sang
3. Tenir horizontalement chaque pipette et recueillir le sang
4. Déposer le sang au fond des puits IgG/IgM et NS1 de la cassette
5. Ajouter immédiatement 2 gouttes de tampon dans le puits IgG/IgM et 1 goutte dans le puits NS1
6. Attendre 10 minutes avant la lecture du test

Matériel Médical CE.

