

Test antigénique nasopharyngé combiné 4 en 1 SARS CoV-2, gripes A et B, VRS - Boîte de 25 - Wellion

Détecte les nouveaux variants Covid. Résultats rapides en 15 min. Usage professionnel.

Le Wellion Combotest 4 en 1 est un test de diagnostic rapide permettant de détecter 4 infections respiratoires : SARS-CoV-2, grippe A, grippe B et VRS à partir d'un seul écouvillon nasopharyngé.

Les résultats sont disponibles en 15 minutes, facilitant une prise en charge précoce.

Matériel Médical CE, 98/79/CE.

- Réduction du nombre d'échantillons nécessaires et simplification des procédures

- Un seul test pour 4 infections
- Détecte les variants du COVID-19, gripes A et B et le Virus Respiratoire Syncytial (VRS)
- Identifie simultanément plusieurs pathogènes respiratoires majeurs
- À partir d'un seul écouvillon nasopharyngé
- Méthode immunochromatographique
- Résultats fiables en 15 minutes

Conditionnement : Boîte de 25 tests.

Chaque kit de test contient :

- 1 test
- 1 écouvillon stérile
- 1 solution d'extraction
- 1 embout de tube
- 1 support de tube
- 1 notice

Mode d'emploi :

1. Insérer l'écouvillon dans la narine
2. Pivoter plusieurs fois l'écouvillon contre la cloison nasale
3. Ouvrir la solution d'extraction
4. Insérer l'écouvillon dans le tube d'extraction contenant la solution d'extraction
5. Tourner l'écouvillon 5 fois en appuyant la tête contre le fond et le côté du tube
6. Retirer l'écouvillon en le pressant contre le tube pour extraire le liquide
7. Appliquer 3 gouttes dans chaque puits d'échantillonnage
8. Lire le résultat du test au bout de 15 min

EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2012, EN 13975:2003, EN ISO 18113-1-2:2011, EN 13612:2002/AC:2002, EN ISO 17511:2021, EN ISO 23640:2015, EN ISO 13641:2002, EN ISO 15223-1:2021.

