

Test de Bowie Dick - Sogeva

Ce test permet de vérifier le bon fonctionnement de la stérilisation de l'autoclave. Uniquement pour la stérilisation à vapeur.

Test de Bowie & Dick permettant une vérification sûre du fonctionnement correct des autoclaves pour la stérilisation à la vapeur.

L'essai doit se faire :

- à 134°C durant 3.5 minutes
- ou à 121°C durant 11 minutes.

Avec une phase de séchage de moins de 5 minutes.

Le test de Bowie Dick est prêt à l'emploi.

Il contient 1300 feuilles de papier recyclé au centre desquelles une feuille test comportant de l'encre organique réactive, virant du rouge au noir selon le résultat du test.

Utilisation :

- Placer le test au centre de la chambre de stérilisation de l'autoclave vide.
- Lancer un cycle de stérilisation de 134°C durant 3,5 minutes.
- A la fin du cycle, sortir le paquet et en extraire la feuille test, la couleur indique le résultat :

Interprétation des résultats :

- rouge : avant test
- noir et rouge : test non validé
- entièrement noir : test validé

Conditionnement : boîte de 1 test

Dimensions d'un test : 11.7 x 9.7 cm

Conforme aux normes :

- ISO 11140-3 (Stérilisation des produits de santé — Indicateurs chimiques — Partie 3 : Systèmes d'indicateurs de Classe 2 pour utilisation lors de l'essai de Bowie et Dick de pénétration de la vapeur)
- ISO 11140-1 (Stérilisation des produits de santé — Indicateurs chimiques — Partie 1 : Exigences générales)

Matériel médical CE.

