

# SPRAY DHP

MOUSSE DETERGENTE DÉSINFECTANTE

POUR SURFACES HAUTES ET DISPOSITIFS MEDICAUX

INVASIFS et NON-INVASIFS.



## DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection des

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical et alimentaire.
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non-invasifs (générateurs d'hémodialyses, sondes d'échographies, unit dentaires....)
- Surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

## FORMULE

Composition: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (salt): 0,21% (CAS: 94667-33-1), agents de surfaces non ioniques, agents séquestrants, excipients.

## MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur la surface ou le DM à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface.

Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface.

Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer, sauf si le produit est en contact avec les denrées alimentaires ou aliments pour animaux.

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN 1276 EN 13727, EN 13697	2 min 5 min
LEVURICIDE	EN 1650, EN 13624, EN 13697	5 min
FONGICIDE	EN 1650, EN13624, EN 13697	15 min
SPORICIDE	EN 13704 sur Clostridium difficile.	15 min
VIRUCIDIE contre virus enveloppés	EN 14476 sur Vaccina. Actif sur Rotavirus, PRV (virus modèle de l'hépatite B), BVDV (virus modèle de l'hépatite C),	5 min

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucun pictogramme de danger.  
Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Produit destiné aux professionnels.  
Utiliser les biocides avec précaution.

## CONDITIONNEMENT

REF : DE177

Spray 750ml.  
Carton de 12 sprays.  
Palette de 50 cartons.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

EAN13 : 3615240000177.

Dispositif médical classe IIb.

Produit biocide TP2 et TP4 (désinfectants pour les surfaces, matériaux équipements et le mobilier avec et sans contact direct avec les denrées alimentaires ou aliments pour animaux).

Produit fabriqué en France.

