

PROTOCOLE D'UTILISATION

INSTRUMED


Détergent pré-désinfectant concentré pour dispositifs médicaux et petit matériel.



MODE D'EMPLOI




1 Préparer une solution d'INSTRUMED à 0,5% dans un bac propre.

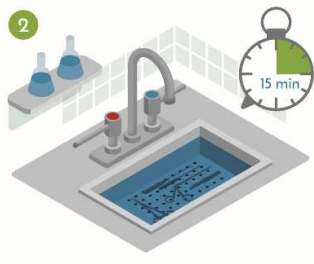

2 Immerger entièrement les instruments chirurgicaux souillés dans le bain de pré-désinfectant. Couvrir le bac durant le temps de contact (15 min). Brosser si présence de souillures apparentes.



3 Sortir les instruments chirurgicaux du bac et les rincer abondamment à l'eau du réseau.

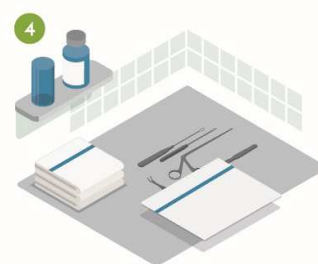

4 Sécher les instruments chirurgicaux à l'aide d'un non-tissé propre.

TABLEAU DE DILUTION

LITRE D'EAU	CONCENTRATION DE LA SOLUTION D'APPLICATION		
	0,5%	2%	5%
1L	5mL	20mL	50mL
5L	25mL	100mL	250mL
10L	50mL	200mL	500mL

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

ACTIVITES	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT
BACTÉRICIDE selon EN1276, EN13697, EN13727	0,50%	5 min
BACTÉRICIDE selon EN14561		15 min
LEVURICIDE selon EN1650, EN13697, EN13624	0,50%	5 min
LEVURICIDE selon EN14562		15 min
TUBERCULOCIDE selon EN14348, EN14563	2%	60 min
	5%	15 min
VIRUCIDE selon:	0,5%	15 min
- EN14476 sur Hépatite B et Herpes virus		
- EN14476 sur Hépatite C, HIV et Vaccinia		
- EN17111 sur Vaccinia		

Indications

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux: instruments chirurgicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie avant stérilisation.

Mode d'emploi

Solution concentrée pour usage professionnel. S'utilise en trempage à la dilution requise en respectant un temps de contact minimum de 5 minutes. Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum 1 fois par jour pour garantir la bonne efficacité du produit.

Conditions de stockage

Stocker entre 5°C et 35°C.

Précautions d'emploi

Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.



Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

CE DM Classe II b
0459

USAGE PROFESSIONNEL